

Let op!! Dit gelaatsscherm is niet gereinigd voor verzending. Reinigen voor gebruik!

Opmerkingen vooraf:

- Reinig het scherm regelmatig.
- Het scherm kan gereinigd worden met de volgende ontsmettingsmaterialen:
 - 70% ethanol alcohol
 - 70% Isopropylalcohol (IPA)
 - IPA-doekjes
 - Bleek, 10 x verdund met leidingwater
 - Zeep
- Deel het scherm niet met iemand anders.
- Wanneer het transparante blad beschadigd raakt, vervang deze dan.

Het scherm in elkaar zetten

1. Op het montuur zitten 4 prikkers, in het doorzichtige blad zitten vier gaatjes.
2. Prik de middelste 2 gaatjes op de middelste 2 prikkers.
3. Buig de pootjes naar buiten om ook de buitenste gaatjes op de pootjes te kunnen prikken
4. Als het gelaatsscherm extra zeker op het hoofd moet zitten, rijg dan het elastiek door de uiteinden zoals op het plaatje hieronder.
5. Professionals die veel het hoofd moeten kunnen draaien, knippen vaak de onderste hoekjes van het transparante blad af.

